

## PRODUKT DATABLAD

### NORDENT 555

## Alginatrens

#### 1. PRODUKTBEKRIVELSE

Opløser aftryksmaterialer (alginat)

#### 2. ANVENDELSESOMRÅDE

Mundskeer og materialer forurenede med aftryksmateriale.

#### 3. PRODUKTEGENSKABER

Renser aftryksmaterialer.

#### 4. INDHOLD

<5% nonioniske overfladeaktive stoffer,  
pH i brugsopløsning 9,3.

#### 5. FREMGANGSMÅDE

Efter brug lægges mundskeer og lignende i en skål med Alginatrens Nordent 555. Efter et par timer er alginaten opløst og kan skylles af med rent vand. Såfremt alginaten er hærdet og tør, kan det være nødvendigt at emnerne ligger i badet natten over, hvorefter der skylles af med rent vand.

#### 6. DOSERING

Alginatrens Nordent 555 anvendes i 5% opløsning svarende til 50 ml. til 1 liter vand.

#### 7. LEVERINGSFORM

1 liter (SKU):5551

#### 8. OPBEVARING

Opbevares frostfrit i original emballage.

#### 9. BORTSKAFFELSE

Ikke farligt gods

P501: Indholdet/holderen bortskaffes i overensstemmelse med lokale regler.

#### 10. FAREIDENTIFIKATION/MÆRKNING



#### ADVARSEL

H319: Forårsager alvorlig øjenirritation.

P101: Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

P102: Opbevares utilgængeligt for børn.

P305+P351+ P338: VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.

P280: Bær beskyttelsehandsker.

P501: Indholdet/holderen bortskaffes i overensstemmelse med lokale regler.

#### 11. SIKKERHEDSANVISNINGER/VÆRNEMIDLER

Indånding: Indånding af dampe og forstøvet produkt kan medføre hoste.

Hud: Længerevarende kontakt med huden kan medføre irritation.

Øjne: Medfører alvorlig øjenirritation.

Indtagelse: Virker irriterende på slimhinderne i mavetarmkanalen. Indtagelse kan medføre kvalme, opkastning opkastninger og diarré samt utilpashed.